

DryZ[®] blu

Pâte hémostatique de rétraction gingivale

Créez un environnement de travail **sec** à chaque fois.

L'alternative au fil qui respecte l'épithélium, sans gêne pour le patient ni traumatisme pour les tissus.



Produits disponibles chez les principaux distributeurs. Parkell Inc. est le fabricant par définition du MOD98/42/CEE. Produits mentionnés de classe I.

parkell[®]



Propriétés

- ✓ Optimisé pour contrôler les hémorragies et les fluides crêviculaire lors de la prise d'empreintes, les restaurations présentant des caries sous-gingivales, la pose de couronnes et la mise en place de digue en caoutchouc.
- ✓ Le chlorure d'aluminium (23%) arrête rapidement les saignements et les suintements gingivaux.
- ✓ La couleur aqua bleue vive et contrastée rend le matériau plus visible sur la structure de la dent.
- ✓ La consistance crémeuse s'adapte bien et s'élimine aisément sous le spray.
- ✓ Le matériau se rince facilement et, en raison de sa couleur, tout résidu est rapidement repéré et éliminé simplement avec un spray eau/air.
- ✓ Temp de prise: 2 minutes.
- ✓ Disponible en seringues et capsules unidoses.



Prenez le contrôle du sulcus pour des impressions numériques parfaites.

Lorsque votre préparation est impeccable, vous voulez que votre scanner numérique capture facilement chaque détail. Dryz® Blu vous aide à y parvenir. Ce matériau s'intègre aisément dans le flux de travail du dentiste numérique, en donnant un coup de pouce supplémentaire pour dégager le champ des obstacles indésirables, afin que vous puissiez obtenir rapidement une empreinte numérique précise et complète à chaque fois.

Dryz® Blu est compatible avec les techniques de rétraction les plus courantes, y compris les coiffes de compression, le fil de rétraction, l'électrochirurgie et le laser.

“

Dryz Blu est la pâte rétraction de choix dans mon cabinet dentaire. Après avoir essayé toutes les pâtes de rétraction disponibles sur le marché, je peux affirmer que c'est tout simplement la meilleure. Sa consistance crémeuse la rend facile à distribuer et, surtout, beaucoup plus facile à rincer que toutes les autres pâtes de rétraction.

”

—Dr. Milad George, Chirurgien-Dentiste, MSc Endodontiste, Suède



Parkell vous conseille:

utilisez Dryz® Blu avec une coiffe de compression !

La pâte permet un meilleur déplacement des tissus lorsque le matériau est pressé en sous-gingival (avec une coiffe de compression ou un rouleau de coton). Cela empêche l'écoulement des fluides crévicaux qui peuvent interférer avec une prise d'empreinte précise et reflète de manière atraumatique le bourrelet gingival loin des bords pour créer un sulcus sec et ouvert.

REF. DESCRIPTION

S187	Dryz Blu Unit Dose Capsules Kit - Inclus 30 capsules unidoses (0.24 g/capsule)
S190	Dryz Blu Syringes Kit - Inclus 7 x 0.5 ml (0.85g) seringues, 15 embouts applicateurs
S191	Dryz Blu Syringes Value Pack - inclus 25 x 0.5 ml (0.85g) seringues et 55 embouts applicateurs

Accessoires

S181	Dryz Syringe Luer Lock Applicator Tips - inclus 40 embouts applicateurs
------	--

Que disent les dentistes de Dryz® Blu ?



"J'aime beaucoup Dryz Blu. Ses qualités sont une bonne visibilité et une viscosité idéale, ni trop fluide ni trop épaisse par rapport aux autres pâtes de rétraction. Sa mouillabilité idéale favorise l'application du matériau au niveau du sulcus gingival, tout autour du collet de la dent, sans interruption. Dryz Blu s'élimine facilement à l'eau et ne laisse aucun résidu. Il n'est pas non plus nécessaire d'utiliser la seringue eau/air au maximum, ce qui augmente souvent le risque de traumatisme du tissu gingival sensible et peut entraîner de nouveaux saignements. Il est rapidement efficace dans son action hémostatique et pour sa capacité d'éviction gingivale. C'est un très bon produit."

Laurence Berenholz-Bury, Chirurgien-dentiste, France



"Dryz Blu fonctionne toujours ! C'est mon dernier recours en cas de saignement et je peux dire qu'il m'a "sauvé la vie" à de nombreuses reprises. Je l'utilise pour la prise d'empreinte numérique et chaque fois que j'ai besoin d'un champ de travail sec pour les obturations composites de classe II et de classe V, par exemple lorsqu'il y a une marge sous-gingivale de la préparation et que le saignement et le liquide crévulaire peuvent compromettre l'adhésion. Je n'utilise que Dryz Blu sans fil car il est moins invasif que le fil. J'aime sa consistance crémeuse mais ferme. Il est facile à appliquer, reste en place et rétracte bien la gencive. Je trouve qu'il arrête efficacement les saignements et surtout qu'il se rince facilement, plus facilement que les autres pâtes que j'ai utilisées."

Jure Pogljajen, Chirurgien-dentiste, Slovenie

Scanner le code pour regarder la video testimonial



"Je sais toujours que je peux faire confiance à Parkell pour créer des produits qui, pour dire les choses simplement, fonctionnent tout simplement. Cela dit, je suis toujours étonné par votre produit Dryz®. Nous l'utilisons depuis quelques années et je suis toujours impressionné par la façon dont il arrête les saignements presque instantanément. J'utilise généralement la rétraction au laser, mais en cas de saignement, j'utilise souvent votre pâte en premier. Une fois lavée, je n'ai que rarement besoin de reprendre le laser. Ce produit est tout simplement incroyable. Je ne compte plus le nombre de fois où il a sauvé la situation et m'a facilité la vie, ainsi que celle du patient. "

Dr. Steven H. Schwartz, Chirurgien-dentiste, Etats Unis



J'utilise Dryz Blu depuis cinq ans maintenant. Ce que j'aime le plus dans Dryz Blu, c'est qu'il se rince très facilement et qu'il me donne à chaque fois un environnement magnifique et propre pour prendre une empreinte numérique ou effectuer une restauration.

Dr. Sjobbe Besseling, Chirurgien-dentiste, Pays Bas

Scanner le code pour regarder la video testimonial

