

Predicta® bulk

BIOACTIVE



Composite universel à prise duale


Un composite à prise duale qui peut être utilisé pour la restauration de toutes les cavités, quelle que soit leur taille, en un seul incrément. Il n'est donc pas nécessaire de procéder par apport de couches successives. Idéal pour les restaurations postérieures.

- **Predicta® Bioactive Bulk est un matériau bioactif. Il libère des ions calcium et phosphate et libère et se recharge en ions fluorure pour stimuler la formation d'hydroxyapatite et la reminéralisation à l'interface matériau-dent.**
- Polymérisation à prise duale pour une profondeur de polymérisation illimitée
- Fluorescence - pour une apparence plus naturelle
- Viscosités et teintes multiples
- Hautement radio-opaque
- Indiqué pour les restaurations de Classe I, II, III, IV et V
- Solide et durable pour résister aux forces occlusales
- Hautement polissable
- Polyvalence des composites constitués de charges nanohybrides

Qu'est-ce que la bioactivité ?

Cette propriété est reconnue dans le domaine dentaire pour renforcer les liaisons chimiques entre la restauration et la dent, permettre une meilleure pénétration du matériau et ainsi combler les micro-espaces, réduire la sensibilité dentaire, éviter les caries secondaires et augmenter l'étanchéité au niveau des anfractuosités marginales des restaurations pour prévenir les microfuites bactériennes.

Formation de l'apatite minérale

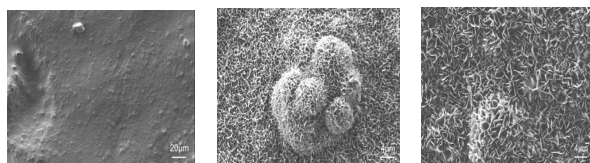

Gauche : Témoin de Predicta sans SBF (fluide corporel simulé). Centre : Predicta, 7 jours en SBF. Droite : Predicta, 28 jours en SBF. Images au MEB Université de Uppsala, Suède.

	
Regular Viscosity (haute viscosité) Idéalement adapté aux situations cliniques pour des restaurations plus volumineuses, lorsque la pérennité est souhaitable et que la viscosité du matériau ne l'est pas.	LV (faible viscosité) Recommandé pour des préparations plus conservatrices, où la capacité à s'étaler et à fluier dans des espaces plus restreints est préférable pour une meilleure adaptation marginale aux parois de la cavité et aux angles de finition difficiles d'accès.
Quel que soit la taille de la cavité à restaurer, les versions Regular et/ou LV de Predicta Bulk sont appropriées et peuvent être utilisées indifféremment. Ces recommandations doivent être considérées comme une aide au choix du produit de « remplissage en vrac » (Bulk Fill) qui correspond le mieux à vos besoins et à vos préférences en matière de restauration.	

ITEM # PRODUCT

ITEM #	PRODUCT	
S615	Bulk-Fill - A1/B1 Shade	Predicta® Bioactive Bulk-Fill Kits Les kits comprennent 1 seringue de 5 ml (9,25 g) et 20 embouts jetables de calibre 17.
S616	Bulk-Fill - A2/B2 Shade	
S610	Bulk-Fill (LV) - A1/B1 Shade	
S611	Bulk-Fill (LV) - A2/B2 Shade	

Accessories & Refills

S620	5 ml Seringue automélangeuse
S621	17-Gauge embouts (30 pcs)
S622	19-Gauge embouts (30 pcs)



Produits disponibles chez les principaux distributeurs.
Parkell est le fabricant par définition du MOD98/42/CEE.
Produits mentionnés de classe IIa

Pour en savoir plus et pour passer commande contacter
infoeurope@parkell.com ☎ +46 708 593 481.

parkell®